

Clinalkan

Détergent désinfectant alcalin

Pour le nettoyage et la pré-désinfection des dispositifs médicaux

Usage par immersion sur l'instrumentation, le matériel d'endoscopie souple et rigide, les dispositifs médicaux invasifs et non invasifs (sondes ETO, sondes endocavitaires, verres trois miroirs, ancillaires, garrot, insufflateurs manuels, récipients).

Formule nouvelle génération: détergence maximisée dès 5 minutes.

Excellente solubilisation des souillures afin d'éviter les redépôts.

Puissant séquestrant pour inhiber les dépôts calcaires qui minéralisent le biofilm.

Prévient les contaminations croisées: bactéricide, levuricide.

Dilution économique à 0,4% : 1L = 250L de solution active.

Mode d'emploi

Préparer la solution à 0,4%

1. Diluer 4mL pour chaque litre de solution active désiré.

Utilisation

1. Immerger complètement les instruments ouverts ou démontés et les dispositifs médicaux en prenant soin d'irriguer les canaux.
2. Temps de contact : 10 minutes.
3. Rincer abondamment.



Présentations commerciales

Flacon de 1L

Bidon de 5L

Dose de 20mL x 250



Clinalkan

Détergent désinfectant alcalin

Pour le nettoyage et la pré-désinfection
des dispositifs médicaux

Propriétés Microbiologiques

	 ESSAIS	MICRO-ORGANISMES	CONCENTRATION	TEMPS DE CONTACT
Bactéries	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0.4 %	5 min
	EN 14561	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0.4 %	10 min
Levures	EN 13624	<i>Candida albicans</i>	0.4 %	5 min
	EN 14562	<i>Candida albicans</i>	0.4 %	5 min
Virus	EN 14476	Norovirus	0.4 %	10 min
	EN 14476	HBV	0.4 %	10 min
	EN 14476	HCV	0.4 %	10 min

Compatibilité

NF S 92-402-1 sur l'acier inoxydable et gaines de nasopharyngoscope. Polycarbonate, Polyéthylène, Polypropylène.
Compatible avec les bacs à ultrasons.

Composition

Tensioactifs cationiques, amphotères et non ioniques, désinfectants.

Caractéristiques

- Etat physique : liquide
- pH : 10 en dilution
- Parfum : aucun
- Couleur : jaune

Précautions d'emploi

DM Classe IIb. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



Accédez aux
informations
produit.

CE 0459
2016



USAGE PROFESSIONNEL



ALKAPHARM
Parc Biocitech, 102 Avenue Gaston Roussel,
93230 Romainville, France. WEB: www.alkapharm.fr
TEL: +33 (0)1 41 50 59 80 FAX: +33 (0)1 48 30 54 31

 certifié ISO 9001/13485
Cibler le risque infectieux